

AeroKat®

Inhalierhilfe für Katzen

Wenn Ihre Katze eines der folgenden Symptome aufweist, könnte sie unter Asthma leiden:

- häufiges Keuchen
- anhaltender Husten
- offener Mund
- oder Schwierigkeiten beim Atmen

Ungefähr jede hundertste Katze hat Asthma - vielleicht sogar mehr, da die Symptome oft mit Haarballen verwechselt werden.



Artikel-Nr. 2001

Die Therapie mit Aerosolen wird bereits seit 1960 zur Behandlung von Atemwegserkrankungen bei Menschen eingesetzt. Da Atemwegserkrankungen bei Katzen ähnlich sind wie beim Menschen, können sie auch auf ähnliche Weise behandelt werden.

Ein Dosieraerosol wird im Normalfall mit 90 km/h abgegeben, so ist eine effektive Verabreichung des Medikaments an Katzen ohne eine Inhalierhilfe nahezu unmöglich.

Die Anwendung des AeroKat® ist kinderleicht:

- das Dosieraerosol wird mit dem AeroKat® verbunden
- die Maske wird auf das Gesicht der Katze aufgesetzt
- das Dosieraerosol wird ausgelöst
- die Katze kann normal atmen und das Medikament in Ruhe inhalieren
- das Flow-Vu®-System ermöglicht eine Kontrolle des Inhalationsvorgangs

Das AeroKat®:

- einfach in der Anwendung und leicht zu reinigen
- reduziert den Medikamentenbedarf
- reduziert die Nebenwirkungen
- das Flow-Vu® System ermöglicht eine optische Kontrolle des Inhalationsvorgangs

Therapie mit dem AeroKat®

Das Ziel der Therapie mit dem AeroKat® ist der Verengung (mit Bronchospasmolytika) und Entzündung (mit Corticosteroiden) der Atemwege entgegenzuwirken.

Richtlinien zur Behandlung von Asthma oder chronischer Bronchitis bei Katzen:
(übernommen von: Padrid, Phillip. Feline Asthma: Diagnosis and Treatment in Veterinary Clinics of North America. Small Animal Practice, Vol. 30. No 6. November 2000.)

Symptome	Empfohlene Behandlung
leicht und unregelmäßig: unregelmäßiges Husten, gelegentlich schweres Atmen	<ul style="list-style-type: none">• Salbutamol bei Bedarf
leicht und permanent: die Symptome beeinflussen die Lebensqualität zwischen den Anfällen nicht; die Katze isst, trinkt und spielt	<ul style="list-style-type: none">• Fluticason 125 µg 2 x täglich• Salbutamol bei Bedarf
mittelschwer und permanent: die Symptome haben einen negativen Einfluss auf die Lebensqualität der Katze aber ihr Husten und Keuchen ist nicht konstant	<ul style="list-style-type: none">• Fluticason 125 µg 2 x täglich• erwägen Sie die Behandlung mit Prednison.• Salbutamol bei Bedarf



Artikel-Nr. 2001