

Zum Einführen von Nasenstück mit Ventilschlauch in den Krümmer benutzen Sie bitte die Einführungshilfe (Abb. 6a-6d).

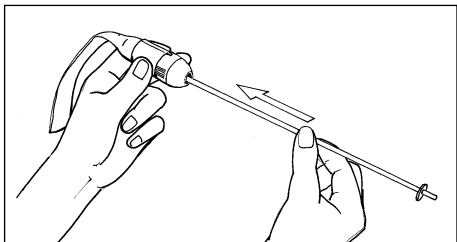


Abb. 6a

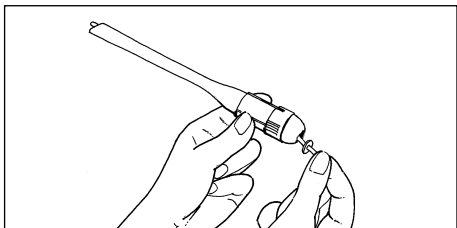


Abb. 6b

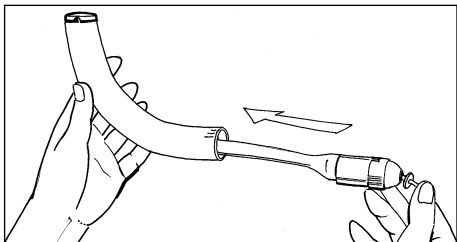


Abb. 6c

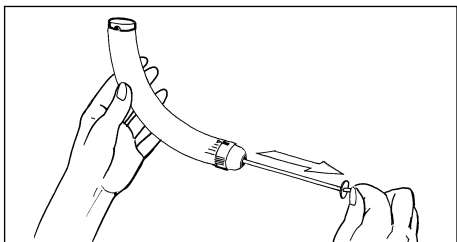


Abb. 6d

Wichtig

**Die Einführungshilfe wieder entfernen!
Das Gerät bitte nur für *einen* Patienten verwenden!**

Gegenindikation

Das RC-Cornet®N sollte nicht angewendet werden:
bei Operationen oder Verletzungen am Gesicht, am Mund oder am Schädel, die weniger als 4 bis 6 Wochen zurückliegen,
bei Operationen an der Speiseröhre,
bei unbehandeltem Pneumothorax,
bei akutem Nasenbluten.

Bei akuten Nasen-Nebenhöhlen- oder Mittelohrentzündungen sollte eine Verwendung nur bei gleichzeitiger Gabe von Antibiotika und nach Aufsuchen eines Arztes erfolgen.

Hinweis

Wir empfehlen vor der Benutzung des Nasencornets eine Salzlösung (1/2 Teelöffel Kochsalz auf ein Glas Wasser) in die Nase einzubringen. Erfahrungsgemäß stellt sich hierdurch ein schneller und ausgeprägter therapeutischer Effekt ein. Bei Entzündungen am Naseneingang und bei Verletzungen im Naseninnern sollten Nasenspülungen nicht durchgeführt werden.

Anmerkung

Geringe weißliche Niederschläge am Schlauch oder im Krümmer stammen von medizinischem Talkum bei der Schlauchherstellung und sind unbedenklich.

Kennen Sie schon unser Zubehör?

Zusätzliche Ersatz-ventilschläuche

– im 2er Set –
(PZN 0458147 / PZN 8756217)

RC-Cornet® Mundset

(PZN 1356503)

Sie besitzen schon ein Nasencornet und möchten auch das Basiscornet anwenden? Dann benötigen Sie nur noch das RC-Cornet®-Mundset.

RC-Cornet®-Adapter mit Nasenstück

(PZN 0824712)

Der RC-Cornet®-Adapter mit Nasenstück ist das Verbindungsstück zwischen Basiscornet und einem Vernebler, um die Physiotherapie des Nasen-Rachen-Raums mit einer Inhalationstherapie zu verbinden.

Der RC-Cornet®-Adapter mit Nasenstück wird nur in Verbindung mit dem Basiscornet angewendet.

RC CORNET® RC

Nasenset

Mittels Nasenset vom Basiscornet zum Nasencornet

Gebrauchsanweisung



PZN 886 233 3

- mit dem Nasenset rüsten Sie das Basiscornet in ein Nasencornet um
- hilft bei chronischer Sinusitis und Postnasal-Drip-Syndrom
- geeignet für Erwachsene und Kinder

CE

Herstellung und Vertrieb:
R. Cegla GmbH & Co. KG
Postfach 1225
56402 Montabaur
Tel. (0 26 02) 92 13-0
Fax (0 26 02) 92 13-15
e-mail: info@cegla.de
Internet: www.cegla.de

RC

37N 10/2009 Ar.


Technik zum Helfen, Heilen, Therapieren

Die Packung enthält

- ① Nasenstück mit Ventilschlauch
- ② Trocknungsspatel
- ③ Einführungshilfe
- ④ Gebrauchsanweisung

Alle Teile sind auch einzeln erhältlich.

Und so rüsten Sie Ihr Basiscornet um:

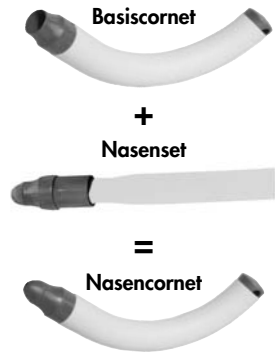

Das RC-Cornet®N ist ein Hilfsmittel zur physikalischen Therapie von chronischer Rhino-Sinusitis und Postnasal-Drip-Syndrom.

Anwendung des RC-Cornet®N

Ausgangsstellung: Kerbe des Nasenstücks auf dem kurzen Pfeil der Röhre! (Abb. 1)

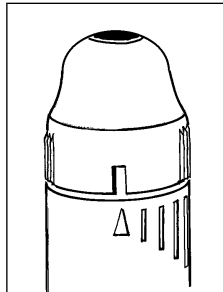


Abb. 1

Führen Sie das Nasencornet in das linke Nasenloch und verschließen Sie mit dem Zeigefinger das rechte Nasenloch (s. Abb. 2).

Atmen Sie durch den Mund ein und blasen Sie die Luft über die Nase **sachte** durch das RC-Cornet®N aus. Führen Sie diese Atmung für 1 bis 2 Minuten durch.

Wiederholen Sie den Vorgang mit dem RC-Cornet®N im rechten Nasenloch und mit dem Zeigefinger verschlossenen linken Nasenloch.



Abb. 2

Durch Drehen des Nasenstücks von Markierung 1 bis 4 am Krümmer, werden Sie feststellen, dass der Druck steigt und die Töne sich verändern (Abb. 2a).

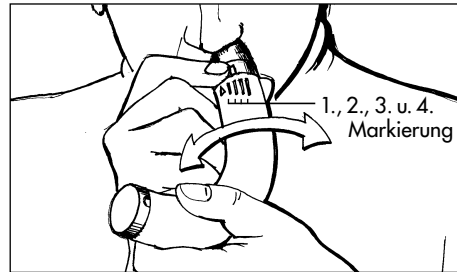


Abb. 2a

Steigern Sie nur langsam den Druck, versuchen Sie, die für Sie angenehmste und wirksamste Position herauszufinden.

Empfohlene Anwendungshäufigkeit

3 x täglich für 1 bis 2 Minuten für jedes Nasenloch

Hinweis

Die Anwendung des Nasencornets ist von der Schwerkraft unabhängig. Sie können das Gerät daher im Liegen, Sitzen und Stehen anwenden.

Unerwünschte Wirkungen

Bei Beginn der Behandlung mit dem RC-Cornet®N kann es zu kurzfristigem Schnupfen, der ein Regulationsphänomen darstellt, kommen.

Physiologische Wirkung des RC-Cornet®N

Das RC-Cornet®N bewirkt über Vibrationen im Nasen-Rachenraum eine Lockerung, Verflüssigung und ein Ablösen des Schleimes. Über physikalische Reize kommt es zu einer Normalisierung der Schleimhaut, wobei je nach Dauer und Schwere der vorangegangenen Störung unterschiedlich lange Zeiträume benötigt werden.

Jede physikalische Therapie wirkt nur, wenn sie regelmäßig durchgeführt wird. Dies gilt auch für das RC-Cornet®N.

Reinigung

Wie bei Ihrem RC-Cornet® können Sie alle Teile

- in der Spülmaschine reinigen
- auskochen
- im Vaporisator und
- mit Heißdampf sterilisieren: Temperatur 121 °C bzw. 134 °C

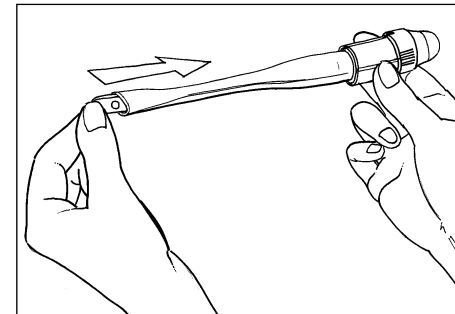


Abb. 3

Zur Reinigung ziehen Sie das Nasenstück mit dem Ventilschlauch aus dem Krümmer und führen Sie bitte wie in Abb. 3 gezeigt, den Trocknungsspatel in den Schlauch ein. Dies erleichtert die Desinfektion und das anschließende Trocknen.

Zusammenstecken des RC-Cornet®N

Falls Sie den Schlauch vom Nasenstück abgezogen haben, ziehen Sie den Ventilschlauch wieder auf das Nasenstück, und zwar bis an die vier länglichen Erhebungen (Abb. 4a+b). Eine davon mündet in die Kerbe des Nasenstücks. Diese muss mittig auf der Breite des Schlauches stehen.

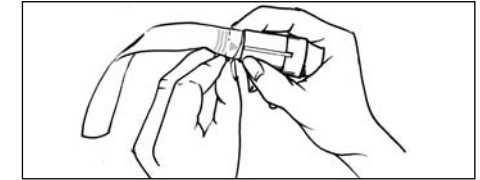


Abb. 4a

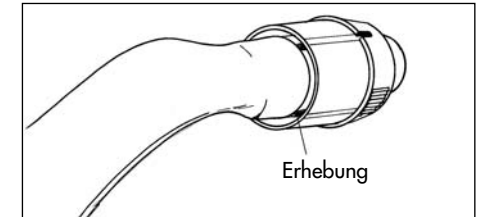


Abb. 4b

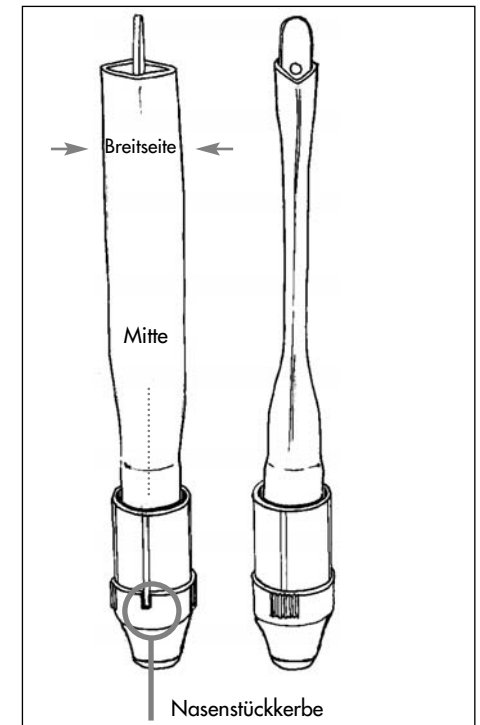


Abb. 5

Wichtig:

Bitte achten Sie darauf, dass die Kerbe des Nasenstücks in der Mitte der Breitseite des Schlauches steht. (Abb. 5)