

## Die Lösung bei chronischer Sinusitis und Postnasal-Drip-Syndrom



### **RC-Cornet®N (Nasencornet)**

- geeignet für Erwachsene und Kinder
- befreit von lästigem Schleim im Nasen-Rachenraum
- lindert Husten bei Postnasal-Drip<sup>1</sup>
- verbessert Belüftung von Nasen-Nebenhöhlen und Mittelohr
- hilft bei Tubenventilationsstörungen
- „trainiert“ die Schleimhäute der oberen Atemwege bei regelmäßiger Anwendung
- senkt den Atemwegswiderstand und die Hyperreagibilität bei Asthma-patienten mit Postnasal-Drip

PZN 886 232 7

Artikel-Nr. 220

<sup>1</sup>Studie bei uns erhältlich



## Kennen Sie das?

- Sekret im Nasen-Rachenraum
- räuspern
- belegte Stimme
- Abgeschlagenheit
- eingeschränkter Geruchssinn
- Kloßgefühl im Hals
- Reizhusten
- Reizbarkeit
- Mundgeruch
- geschwollene Augen

## Ihre Lösung: RC-Cornet®N

Beim „Ausblasen“ über die Nase entstehen Vibrationen, die über den gemeinsamen Ausführungsgang der Nasen-Nebenhöhlen im mittleren Nasengang die „Verengungen“ aufsprengen, so dass der Schleim abfließen kann. Zudem „massieren“ die Vibrationen die Schleimhäute des oberen Nasen-Rachenraumes. Dadurch werden die Durchblutung, der Lymphabfluss und die Schlagkraft der Flimmerhärchen verbessert.

Die Vibrationen des **RC-Cornet®N** werden durch die Kraft der Ausatemluft – ohne sonstige Energiequelle – durch einen schwingenden Ventilschlauch erzeugt.

Das Nasencornet wirkt auch auf die Eustach'sche Röhre durch den positiven Druck abschwellend und schleimlösend, sodass diese ihrer Aufgabe, das Mittelohr zu belüften, wieder ungehindert nachkommen kann.

