

# RC-Manometer Kombiset



**Zur Druckkontrolle während  
der Physiotherapie  
mit dem RC-Cornet®**



PZN 303 043 8

**Gebrauchs-  
anweisung**

Technik zum  
Helfen, Heilen  
Therapieren


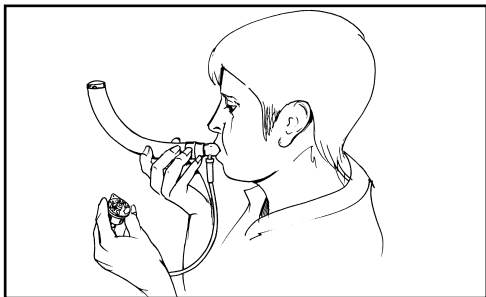


Abb. 1

Stecken Sie den Adapter mit der kleineren Öffnung auf das Mundstück des RC-Cornet®. Umschließen Sie mit den Lippen die größere Öffnung des Adapters und atmen Sie wie in der Gebrauchsanleitung des RC-Cornet® beschrieben durch das RC-Cornet® aus. (s. Abb. 1) Ihren erreichten Druck lesen Sie während der Therapie auf dem Manometer ab.

**Bitte versuchen Sie die Bandbreite des Druckes innerhalb der grünen Fläche zu belassen.**

Zur Reinigung nehmen Sie die Teile des RC-Manometer-Kombisets auseinander.

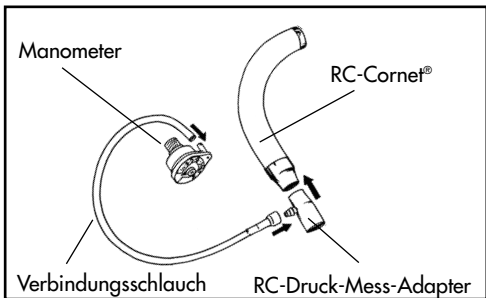

## Reinigung des RC-Druck-Mess-Adapters:

Sie können den Adapter

- in der Spülmaschine reinigen
  - auskochen
  - im Vaporisator und
  - mit Heißdampf sterilisieren
- Temperaturen 121 °C bzw. 134 °C

Bei regelmäßiger Anwendung zweimal pro Woche reinigen.

### Wichtig:

Das Manometer darf **nicht** feucht gereinigt werden und ist bei Verunreinigungen zu ersetzen!

Den Schlauch in einer lauwarmen Spülmittellösung reinigen.

## Manometer und Verbindungsschlauch



PZN 918 982 6, Art. Nr. 403m

Zu beziehen über alle Apotheken, Sanitätshäuser oder unseren Onlineshop: [www.cegla.de/shop](http://www.cegla.de/shop)



Herstellung und Vertrieb:  
**R. Cegla GmbH & Co. KG**  
Postfach 1225  
D-56402 Montabaur  
Tel. (02602) 9213-0  
Fax (02602) 9213-15  
E-mail: [info@cegla.de](mailto:info@cegla.de)  
Internet: [www.cegla.de](http://www.cegla.de)