

Die **RespiChamber*** HOSPITAL Autoklavierbare Ventilinhalationskammer (VHC) wird mit einem Aerosoldosiergerät verwendet und ist für die Anwendung bei mehreren Patienten unter der Aufsicht einer medizinischen Fachkraft bestimmt. Die **RespiChamber*** HOSPITAL Autoklavierbare VHC wird aus Komponenten höchster Qualität hergestellt, um eine komfortable Anwendung und konstante Arzneimittelabgabe zu gewährleisten.

Gebrauchsanleitung

1. Die Kammer auf eventuell vorhandene Fremdkörper untersuchen. Die dem Aerosoldosiergerät beiliegenden Anleitungen lesen.
2. Die Kappe des Aerosoldosiergerätes abnehmen und das Gerät vor jeder Anwendung schütteln. Das Aerosoldosiergerät in den rückwärtigen Teil der Kammer einsetzen.
3. **MUNDSTÜCK:** Das Mundstück in den Mund stecken und sicherstellen, dass es effektiv abgedichtet ist. Zu Beginn einer langsamen Inhalation das Aerosoldosiergerät drücken. Jeweils nur EINEN HUB abgeben. Den Patienten anweisen, tief einzuatmen und den Atem so lange wie möglich bis maximal 10 Sekunden anzuhalten und dann auszuatmen. Alternativ kann das Mundstück mit den Lippen dicht umschlossen gehalten und nach Drücken des Aerosoldosiergerätes 2- bis 3-mal langsam eingeatmet werden.
- MASKE:** Die Maske auf das Gesicht legen und sicherstellen, dass sie effektiv auf dem Gesicht abschließt/abgedichtet ist. Zu Beginn einer langsamen Inhalation das Aerosoldosiergerät drücken. Jeweils nur EINEN HUB abgeben. Den Patienten anweisen, tief einzuatmen und den Atem so lange wie möglich bis maximal 10 Sekunden anzuhalten und dann auszuatmen. Alternativ kann eine effektive Abdichtung zwischen Maske und Gesicht aufrechterhalten und nach Drücken des Aerosoldosiergerätes 5- bis 6-mal langsam eingeatmet werden.
4. In Bezug auf die Wartezeit zwischen den Dosisabgaben sind die Anweisungen zum Aerosoldosiergerät zu beachten.

Reinigungsanleitung

Die **RespiChamber*** HOSPITAL Autoklavierbare VHC muss gemäß den folgenden Anweisungen wiederaufbereitet werden. Dabei muss sorgfältig darauf geachtet werden, dass keine Komponenten von verschiedenen Geräten vertauscht werden.

1. Nur das rückwärtige Teil (und ggf. die Maske) von der Ventilinhalationskammer abnehmen. Mundstück oder Maskenadapter dürfen NICHT demontiert werden.
2. Die Komponenten auf Fremdstoffe und durch den normalen Gebrauch entstehende Verunreinigungen untersuchen. Falls notwendig, in einer milden Lösung aus flüssigem Spülmittel und lauwarmem, sauberem Wasser einweichen. Die Teile müssen vor der Autoklavierung gründlich in sauberem Wasser abgespült werden.
3. Die Anweisungen des Autoklavenherstellers befolgen und die maximal zulässige Temperatur von 134 °C nicht überschreiten. Darauf achten, dass das Produkt mit keinen anderen Materialien im Autoklaven in Berührung kommt, und dass während der Wiederaufbereitung nichts auf das Gerät gelegt wird.
4. Die Kammer auf verzogene oder verformte Komponenten untersuchen. Wenn irgendeine Komponente Anzeichen einer Beschädigung aufweist, muss das Gerät entsorgt werden.
5. Zum Reduzieren der statischen Aufladung nach dem Autoklavieren beide Teile in eine Lösung aus warmem Wasser und Geschirrspülmittel legen. Nicht abspülen.
6. Überschüssiges Wasser ausschütten und Teile in vertikaler Stellung an der Luft trocknen lassen. Vor dem erneuten Zusammensetzen müssen alle Teile trocken sein. Nicht trockenreiben.
7. Das rückwärtige Teil (und ggf. die Maske) wieder an der Kammer anbringen.

VORSICHTSHINWEISE

- Nur unter der Aufsicht einer medizinischen Fachkraft anwenden und die gesamte Gebrauchsanweisung vor der Anwendung durchlesen.
- Das Produkt nicht weiter zerlegen als in der Reinigungsanleitung angegeben, da es ansonsten beschädigt werden kann.
- Die mit dem Aerosoldosiergerät mitgelieferten Anweisungen lesen und befolgen.
- Die Ventilinhalationskammer nicht unbeaufsichtigt in Gegenwart von Kindern belassen.
- Dieses Produkt enthält kein Latex.