

# Sauerstoffnasenbrille Für Erwachsene

## Aus weichem Kraton

**PZN 336 730 4      RC-Artikel-Nr. 710**



**Gebrauchsanweisung** - Bitte sorgfältig lesen!

Sauerstoffnasenbrille aus Kraton bestehend aus:

- weichen Kraton-Nasenspitzen
- Anschluss Schlauch 2,1 m



**Verwendungszweck** - Mit der Sauerstoffnasenbrille atmen Sie medizinischen Sauerstoff über die Nase ein. Weiche Kraton-Nasenspitzen verhindern bei Überempfindlichkeit allergische Reaktionen am Naseneingang - die Nase wird geschont. Der mit der Sauerstoffnasenbrille verbundene Schlauch ist durch Innenriefen und Verstärkungen abknicksicher.

### Anwendung

Die Sauerstoffnasenbrille wie eine Schlinge über den Kopf ziehen, die Nasenspitzen weisen dabei auf Sie zu. Den oberen Teil wieder nach vorne ziehen, so dass der Schlauch wie eine Brille von den Ohren gehalten wird. Nasenspitzen in jedes Nasenloch einführen. Sitz der Brille durch Hochschieben der Befestigungsschleife am unteren Ende der Sauerstoffnasenbrille fixieren. Adapter am Schlauchende mit der Sauerstoffquelle verbinden und den vorgeschriebenen Sauerstofffluss einstellen.

### Reinigung und Hygiene

Reinigen Sie die Nasenteile mit einem handelsüblichen Geschirrspülmittel oder in einer Essigwasserlösung (Mischungsverhältnis von 4 : 1). Spülen Sie dann mit klarem Wasser nach. Aus hygienischen Gründen sollten nur Sie die Sauerstoffnasenbrille benutzen! Nehmen Sie regelmäßig (spätestens nach 14 Tagen) eine neue Sauerstoffnasenbrille. Der Schlauch enthält Phtalate. In den Nasenspitzen sind keine Phtalate enthalten.

### Warnhinweis

Verwenden Sie keinesfalls öl- oder fetthaltige Nasensprays, Cremes oder Nasentropfen in Verbindung mit Sauerstoff.

Wir empfehlen das Nasen- und Rachenspray RC-Pflege®N (PZN 6415162)

 Hersteller: Respan Products  
Inc. 8 Erinville Drive, Erin,  
Ontario, Canada N0B1T0



REV. 06-1500-19

LOT# 050418



2014-05

#### Alleinvertreib:

R. CEGLA GmbH & Co. KG, Postfach 1225,  
D-56402 Montabaur, Germany,  
Tel. (02602) 92 13-0 Fax (0 26 02) 92 13-15

EU-Verantwortlicher: mdi EUROPA GmbH,  
Langenhagener Str.71,  
30855 Hannover,-Langenhagen, Germany

**Respan®**