

RC


RC-CORNET®- ADAPTER MIT MUNDSTÜCK

**Zur Inhalation und
Physiotherapie
des Bronchialsystems**



**Gebrauchs-
anweisung**

Technik zum
Helfen, Heilen
Therapieren

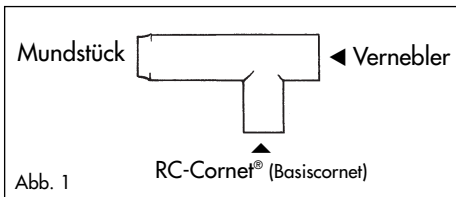

Verbinden Sie den **RC-Cornet®-Adapter mit Mundstück** mit dem Vernebler (s. Abb. 1), dazu muss vorher das Mundstück des Verneblers abgezogen werden.

Schieben Sie dann das **RC-Cornet® (Basiscornet)** auf den Stützen des Adapters (s. Abb. 2), so dass es fest sitzt.

Stellen Sie das gewünschte Druckprofil am **RC-Cornet®** durch Verdrehen des Mundstückes am Krümmer ein.

Umschließen Sie mit den Lippen das **Mundstück des RC-Cornet®-Adapter mit Mundstück**, inhalieren Sie bei der Einatmung und atmen Sie gegen den entstehenden oszillierenden Widerstand aus.

Empfohlene Anwendungshäufigkeit:

2-3 x täglich 2 bis 5 Minuten (bei starker Verschleimung auch häufiger).

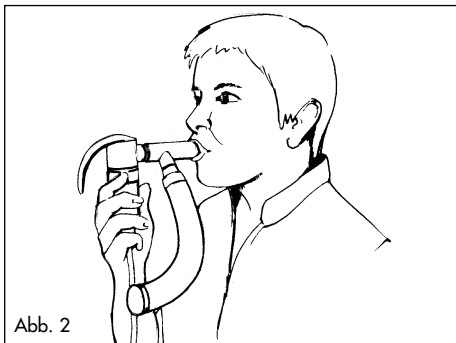


Abb. 2

Reinigung:

RC-Cornet®-Adapter mit Mundstück können Sie

- in der Spülmaschine reinigen
- auskochen
- im Vaporisator und
- mit Heißdampf:
Temperatur 121 °C

Reinigen Sie den RC-Cornet®-Adapter mit Mundstück alle 1 bis 2 Tage!

Das Gerät bitte nur für einen Patienten verwenden!

PZN 141 313 5

Zu beziehen über alle Apotheken und Sanitätshäuser.



Herstellung und Vertrieb:
R. Cegla GmbH & Co. KG

Postfach 12 25

D-56402 Montabaur

Tel. (0 26 02) 92 13-0

Fax (0 26 02) 92 13-15

E-mail: info@cegla.de

Internet: www.cegla.de