

RC


RC-CORNET®- ADAPTER MIT NASENSTÜCK

**Zur Aerosol-
und Physiotherapie des
Nasen-Rachen-Raums**



**Gebrauchs-
anweisung**

Technik zum
Helfen, Heilen
Therapieren

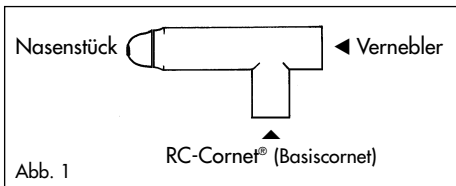

Verbinden Sie den **RC-Cornet®-Adapter** mit **Nasenstück** mit dem Vernebler (s. Abb. 1), dazu muss vorher das Mundstück des Verneblers abgezogen werden.

Schieben Sie dann das RC-Cornet® (Basiscornet) auf den Stützen des Adapters (s. Abb. 2), so dass es fest sitzt.

Achten Sie darauf, dass das RC-Cornet® (Basiscornet) in der Ausgangsstellung steht (Kerbe des Mundstücks steht über dem Pfeil des Krümmers).

Verschließen Sie ein Nasenloch mit dem Zeigefinger und drücken Sie die Nasenolive des **RC-Cornet®-Adapters** in das andere Nasenloch.

Atmen Sie nun das Aerosol über die Nasenolive ein und erzeugen Sie beim forcierten Ausatmen über die Olive die heilsamen Druckschwankungen im Nasen-Rachen-Raum.

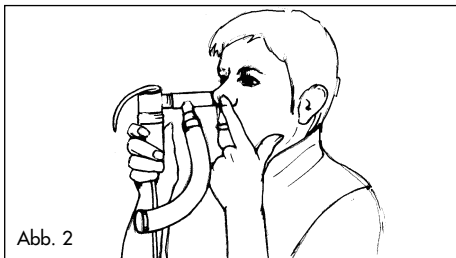


Abb. 2

Empfohlene Anwendungshäufigkeit:

2-3 x täglich 2 bis 5 Minuten (bei starker Verschleimung auch häufiger).

Reinigung:

RC-Cornet®-Adapter mit Nasenstück können Sie

- in der Spülmaschine reinigen
- auskochen
- im Vaporisator und
- mit Heißdampf:

Temperatur 121 °C

Reinigen Sie den RC-Cornet®-Adapter mit Nasenstück alle 1 bis 2 Tage!

Das Gerät bitte nur für einen Patienten verwenden!

PZN 082 471 2

Zu beziehen über alle Apotheken und Sanitätshäuser.



Herstellung und Vertrieb:
R. Cegla GmbH & Co. KG

Postfach 12 25

D-56402 Montabaur

Tel. (0 26 02) 92 13-0

Fax (0 26 02) 92 13-15

E-mail: info@cegla.de

Internet: www.cegla.de