

RC-SAUERSTOFFNASENBRILLE OHNE PHTHALATE – FÜR SÄUGLINGE

Aus weichem Kraton

Im Lieferumfang enthalten:

- weiche Kraton-Nasenspitzen
- Anschluss Schlauch 2,1 m



Gebrauchsanweisung –
Bitte sorgfältig lesen!




VERWENDUNGSZWECK: Mit der Sauerstoffnasenbrille atmen Sie medizinischen Sauerstoff über die Nase ein. Weiche Kraton-Nasenspitzen verhindern bei Überempfindlichkeit allergische Reaktionen am Naseneingang – die Nase wird geschont. Der mit der Sauerstoffnasenbrille verbundene Schlauch ist durch Innenriefen und Verstärkungen abknicksicher. Die maximale Durchflussrate der Sauerstoffnasenbrille beträgt 6 l/min.

ANWENDUNG: Die Sauerstoffnasenbrille wie eine Schlinge über den Kopf ziehen, die Nasenspitzen weisen dabei auf Sie zu. Den oberen Teil wieder nach vorne ziehen, sodass der Schlauch wie eine Brille von den Ohren gehalten wird. Nasenspitzen in jedes Nasenloch einführen. Sitz der Brille durch Hochschieben der Befestigungsschlaufe am unteren Ende der Sauerstoffnasenbrille fixieren. Adapter am Schlauchende mit der Sauerstoffquelle verbinden und den vorgeschriebenen Sauerstofffluss einstellen.

REINIGUNG UND HYGIENE: Reinigen Sie die Nasenteile mit einem handelsüblichen Geschirrspülmittel oder in einer Essigwasserlösung (Mischungsverhältnis von 4:1). Spülen Sie dann mit klarem Wasser nach. **Bitte nur für einen Patienten verwenden!** Nehmen Sie regelmäßig (spätestens nach 14 Tagen) eine neue Sauerstoffnasenbrille. Der Schlauch sowie die Nasenspitzen sind zu 100% phthalatfrei.

WARNHINWEIS: Verwenden Sie keinesfalls öl- oder fetthaltige Nasensprays, Cremes oder Nasentropfen in Verbindung mit Sauerstoff. Wir empfehlen das Nasen- und Rachenspray RC-Pflege® N (PZN 06 415 162) oder das RC-Gel NASAL (PZN 12 510 686). Rauchen, Streichhölzer und offene Flammen, wie brennende Kerzen oder Feuerstellen, sind in der Nähe von Sauerstoffgeräten/Sauerstoffnasenbrillen strengstens verboten.

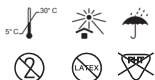

Erhältlich in Apotheken,
Sanitätshäusern oder unter
www.cegla-shop.de

 **Hersteller:**

Respan Products
Inc. 8 Erinville Drive, Erin,
Ontario, Canada N0B1T0

EU-Verantwortlicher:
mdi EUROPA GmbH
Langenhagener Str. 71
D-30855 Hannover-
Langenhagen

CEGLA
MEDIZINTECHNIK

Alleinvertrieb:
R. Cegla GmbH & Co. KG
Horresser Berg 1
56410 Montabaur
Germany
Tel +49 2602 9213-0
info@cegla.de
www.cegla.de

REF 712 | PZN 033 673 10



REV.

LOT

CE
0120