

RC-Cornet® PLUS NASAL OPEP Atemtherapie

Mögliche Wirkungsweisen:

- befreit die oberen Atemwege von Schleim, (z. B. bei chronischer Sinusitis*)
- lindert Husten bei Postnasal-Drip-Syndrom
- senkt bronchiale Hyperreagibilität**)
- hilft bei Nasenspraysucht
- verbessert die Belüftung der Nasennebenhöhlen und des Mittelohrs
- verbessert auch Erkrankungen der unteren Atemwege

KURZANLEITUNG

Alle Produkte der RC-Cornet® PLUS Varianten können lageunabhängig im Sitzen, Stehen oder Liegen angewendet werden.




EMPFOHLENE ANWENDUNGSDAUER:

3 x tägliche Anwendung für mind. 2 Minuten pro Nasenloch oder wie vom Arzt empfohlen.

RC-CORNET® PLUS NASAL

INITIALDRUCKE JE EINSTELLUNG I UND II:

Die Auswahl verschiedener Widerstände ermöglicht eine individuelle Atemtherapie.

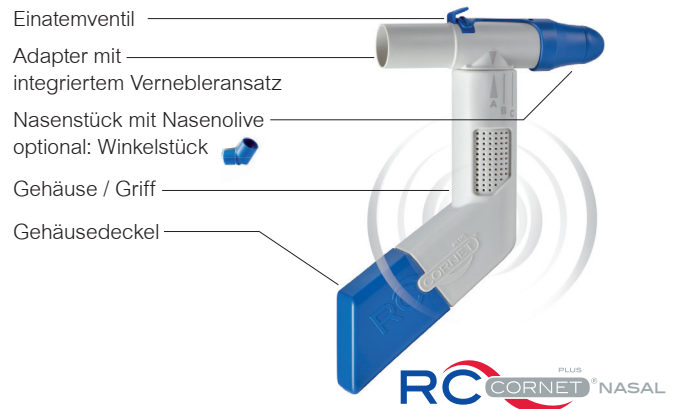

Anwendung:

Mit Einstellung I werden die Atemwege zunächst geweitet für eine **anschließende** effektivere Schleimlösung mit Einstellung II.


Einstellung I:

Stabilisierender Ausatemdruck zur Weitung der Atemwege



Einstellung II:

Mobilisierender Ausatemdruck mit hoher Flussrate zum Sekretabtransport*

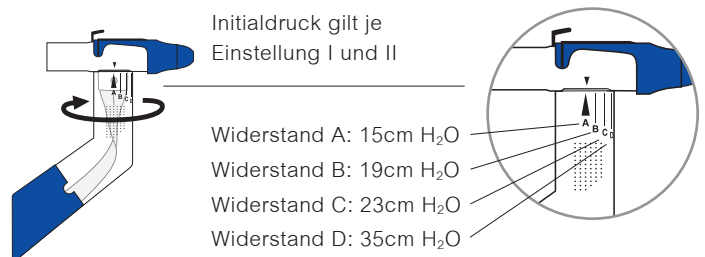

Kombi-Therapie – die gleichzeitige Atemtherapie und Feuchtinhalation ermöglicht:




RC-Cornet® PLUS NASAL
Kombi-Therapie



Verkürzung
der täglichen
Therapiezeit



Verbesserung der
Medikamenten-
deposition

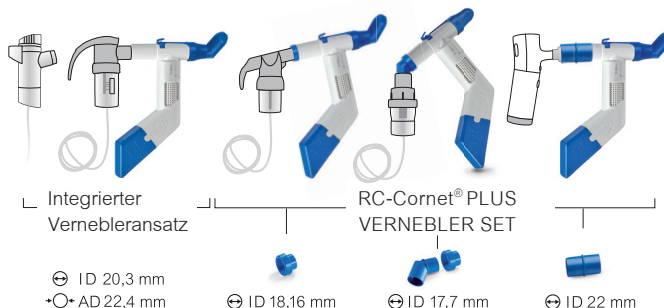

Weitung der Atemwege in Einstellung I und gleichzeitige Feuchtinhalation über den integrierten Vernebleransatz*. Der integrierte Vernebleransatz ist passend für alle ISO-genormten Vernebler.



Für nicht-ISO-genormte Vernebler:
RC-Cornet® PLUS VERNEBLER SET
Artikel-Nr. 2651

* Bei starker Polypenbildung ist der Therapieverlauf nicht absehbar.

** Studien und weiterführende Informationen auf www.cegla.de/service/fachinformationen/




ANLEITUNG REINIGUNG UND DESINFEKTION (AUSKOCHEN)

Waschen Sie sich bitte vor der Reinigung die Hände.
Zur Reinigung zerlegen Sie das RC-Cornet® PLUS NASAL in seine Einzelteile. Reinigen Sie alle Einzelteile gründlich mit handelsüblichen Geschirrspülmittel und lauwarmen Wasser. Spülen Sie mit klarem Wasser nach.

Desinfizieren Sie alle Teile nach der Reinigung im Vaporisator oder ca. 5 Minuten in kochendem Wasser. Maximale Temperatur 134 °C. Lassen Sie danach alle Teile an der Luft vollständig trocknen!

In der Klinik kann das RC-Cornet® PLUS NASAL auch maschinell gereinigt oder autoklaviert werden.


Eine separate klinische Aufbereitungsanleitung erhalten Sie auf Anfrage unter info@ceгла.de

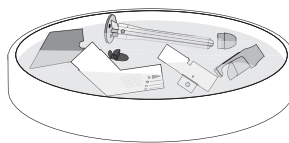

ANLEITUNG ZUSAMMENSTECKEN

Waschen Sie sich bitte vor dem Zusammenstecken die Hände.

- Setzen Sie das Einatemventil in den Adapter ein.
- Schieben Sie die Nasenolive (optional mit Winkelstück) in das Nasenstück. Stecken Sie dann das Bauteil mittig auf den Adapter. Für die Anwendung folgen Sie bitte immer der Beschreibung (siehe Seite 6 und 7).
- Ziehen Sie die Reinigungshilfe aus dem Schlauch.
- Schieben Sie den Schlauch in den Adapter. Achten Sie darauf, dass der Zentrierpunkt in die Aussparung am Adapter einrastet.
- Führen Sie dann den entstandenen Aufsatz in das Gehäuse ein. Achten Sie bitte darauf, dass die Pfeile auf dem Adapter und dem Gehäuse exakt übereinanderstehen.
- Kontrollieren Sie die Lage des Schlauches. Er darf nicht gestaucht im Gehäuse liegen.
- Setzen Sie den Gehäusedeckel in das Gehäuse ein.

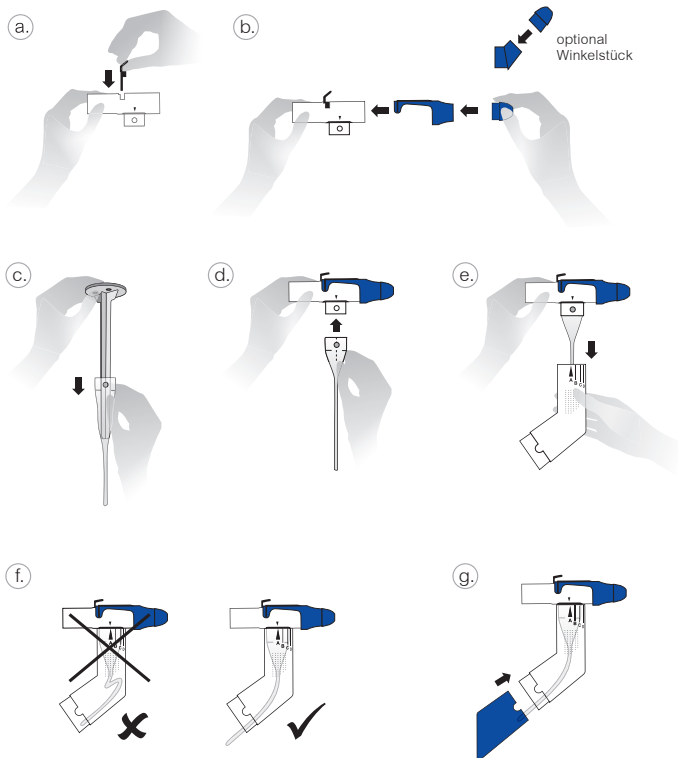

Weitere Informationen und Film:
www.ceгла.de/produkte/atemtherapie/rc-cornet-plus-nasal/
oder einfach den QR Code scannen.



Bitte ausführliche Gebrauchsanweisung und Kontraindikationen beachten.