



Bitte vor dem ersten Gebrauch sorgfältig lesen!

Prüfen Sie, ob sich im RC-Animal Chamber® Fremdkörper befinden, Teile beschädigt sind oder fehlen. Vor dem ersten Gebrauch und anschließend mindestens wöchentlich den RC-Animal Chamber® entsprechend der Anleitung reinigen. Das Gerät bitte nur für ein Tier verwenden!
Tipp: Wir empfehlen Ihnen die Anwendung vor Fütterung!

Verwendungszweck

Der RC-Animal Chamber® ist eine Inhalationshilfe, die speziell für die Therapie mit Medikamentensprays – so genannte Dosieraerosole – entwickelt wurde und zur Behandlung von Atemwegserkrankungen bei Tieren eingesetzt wird. Der flexible Universaladapter ermöglicht eine Therapie mit allen gängigen Dosieraerosolen.

Mit Hilfe des RC-Animal Chamber®:

- wird eine Anwendung mittels Dosieraerosols erst ermöglicht
- werden die Nebenwirkungen im Gegensatz zu herkömmlichen Therapien (z.B. bei Tabletten-gabe oder Injektion) vermindert

Verwendung nach tierärztlicher Anweisung!

Die Packung enthält den RC-Animal Chamber® bestehend aus:

1. Aufsatzstück für die Maske
2. Ventil & Einatemkontrolle
3. Aerosol-Aufnahmekammer
4. Universaladapter für Dosieraerosole (abnehmbar)
5. Zudem enthalten die Artikel:
 - RC-Animal Chamber® Katze 2 Masken (XS, S)
 - RC-Animal Chamber® Hund 3 Masken (XS, S, M)
 - RC-Animal Chamber® Pferd 1 Maske (L)



Katze Anwendung RC-Animal Chamber® Katze (mit 2 Masken „XS“, „S“)

<p>1</p> <p>1. Entfernen Sie die Verschlusskappe vom Mundstück des Dosieraerosols und schütteln Sie das Dosieraerosol vor jedem Gebrauch kräftig.</p>	<p>2</p> <p>2. Stecken Sie das Mundstück des Dosieraerosols in den vorgesehenen Universaladapter des RC-Animal Chamber®.</p>	<p>3</p> <p>3. Setzen Sie die Maske behutsam auf die Schnauze. Achten Sie bitte darauf, dass die Maske dicht abschließt.</p> <p>Siehe Anwenderbild auf der Rückseite.</p>	<p>4</p> <p>4. Drücken Sie die Kartusche des Dosieraerosols nach unten, um einen Sprühstoß in die Kammer des RC-Animal Chamber® abzugeben.</p> <p>Sollte das Tier sehr ängstlich sein, fragen Sie bitte Ihren Tierarzt um Rat.</p>	<p>5</p> <p>5. Die Atemzüge sind an den Ventilbewegungen ablesbar. Halten Sie den RC-Animal Chamber® für vier bis sechs Atemzüge auf die Schnauze.</p>	<p>6</p> <p>6. Hat der Tierarzt mehrere Sprühstöße verordnet, sollte eine Minute vergehen, ehe die Schritte 3 bis 5 wiederholt werden!</p> <p>Tipp: Belohnen Sie Ihr Tier!</p>
--	---	--	---	---	---

Hinweis

- Benutzen Sie bitte **die** Maske, die einen Verschluss der Schnauze sicherstellt. Stecken Sie die ausgesuchte Maske so auf, dass sie mit der Kammer abschließt und fest sitzt.
- Um das Tier an den RC-Animal Chamber® zu gewöhnen, ist es sinnvoll, das Dosieraerosol in die Kammer zu sprühen, bevor Sie die Maske auf die Schnauze aufsetzen.
- Hat der Tierarzt mehrere Sprühstöße verordnet, geben Sie immer **nur einen Sprühstoß** pro Inhalationsvorgang in die Kammer! Beachten Sie die Gebrauchsanleitung des Dosieraerosols sowie die Anweisungen des Tierarztes.

Hund Anwendung RC-Animal Chamber® Hund (mit 3 Masken „XS“, „S“, „M“)

<p>1</p> <p>1. Entfernen Sie die Verschlusskappe vom Mundstück des Dosieraerosols und schütteln Sie das Dosieraerosol vor jedem Gebrauch kräftig.</p>	<p>2</p> <p>2. Stecken Sie das Mundstück des Dosieraerosols in den vorgesehenen Universaladapter des RC-Animal Chamber®.</p>	<p>3</p> <p>3. Setzen Sie die Maske behutsam auf die Schnauze. Achten Sie bitte darauf, dass die Maske dicht abschließt.</p> <p>Siehe Anwenderbild auf der Rückseite.</p>	<p>4</p> <p>4. Drücken Sie die Kartusche des Dosieraerosols nach unten, um einen Sprühstoß in die Kammer des RC-Animal Chamber® abzugeben.</p> <p>Sollte das Tier sehr ängstlich sein, fragen Sie bitte Ihren Tierarzt um Rat.</p>	<p>5</p> <p>5. Die Atemzüge sind an den Ventilbewegungen ablesbar. Halten Sie den RC-Animal Chamber® für vier bis sechs Atemzüge auf die Schnauze.</p>	<p>6</p> <p>6. Hat der Tierarzt mehrere Sprühstöße verordnet, sollte eine Minute vergehen, ehe die Schritte 3 bis 5 wiederholt werden!</p> <p>Tipp: Belohnen Sie Ihr Tier!</p>
--	---	--	---	---	---

Hinweis

- Benutzen Sie bitte **die** Maske, die einen Verschluss der Schnauze sicherstellt. Stecken Sie die ausgesuchte Maske so auf, dass sie mit der Kammer abschließt und fest sitzt.
- Um das Tier an den RC-Animal Chamber® zu gewöhnen, ist es sinnvoll, das Dosieraerosol in die Kammer zu sprühen, bevor Sie die Maske auf die Schnauze aufsetzen.
- Hat der Tierarzt mehrere Sprühstöße verordnet, geben Sie immer **nur einen Sprühstoß** pro Inhalationsvorgang in die Kammer! Beachten Sie die Gebrauchsanleitung des Dosieraerosols sowie die Anweisungen des Tierarztes.

Pferd Anwendung RC-Animal Chamber® Pferd (mit Maske „L“)

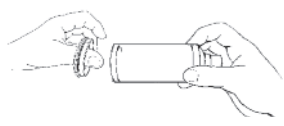
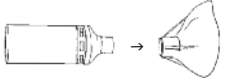
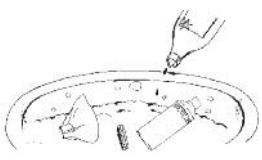
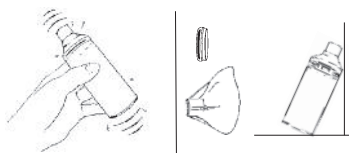
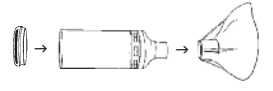
<p>1</p> <p>1. Entfernen Sie die Verschlusskappe vom Mundstück des Dosieraerosols und schütteln Sie das Dosieraerosol vor jedem Gebrauch kräftig.</p>	<p>2</p> <p>2. Stecken Sie das Mundstück des Dosieraerosols in den vorgesehenen Universaladapter des RC-Animal Chamber®.</p>	<p>3</p> <p>3. Setzen Sie die Maske behutsam auf eine der Nüstern. Achten Sie bitte darauf, dass die Maske dicht abschließt.</p> <p>Siehe Anwenderbild auf der Rückseite.</p>	<p>4</p> <p>4. Drücken Sie die Kartusche des Dosieraerosols nach unten, um einen Sprühstoß in die Kammer des RC-Animal Chamber® abzugeben.</p> <p>Sollte das Tier sehr ängstlich sein, fragen Sie bitte Ihren Tierarzt um Rat.</p>	<p>5</p> <p>5. Die Atemzüge sind an den Ventilbewegungen ablesbar. Halten Sie den RC-Animal Chamber® für vier bis sechs Atemzüge auf die Nüster.</p>	<p>6</p> <p>6. Hat der Tierarzt mehrere Sprühstöße verordnet, sollte eine Minute vergehen, ehe die Schritte 3 bis 5 wiederholt werden!</p> <p>Tipp: Belohnen Sie Ihr Tier!</p>
--	---	--	---	---	---

Hinweis

- Stecken Sie die Maske so auf, dass diese mit der Kammer abschließt und fest sitzt. Die Maske mit der Kammer und dem Dosieraerosol so auf die Nüster setzen, dass diese vollständig umschlossen wird.
- Um das Tier an den RC-Animal Chamber® zu gewöhnen, ist es sinnvoll, das Dosieraerosol in die Kammer zu sprühen, bevor Sie die Maske auf die Nüster aufsetzen.
- Hat der Tierarzt mehrere Sprühstöße verordnet, geben Sie immer **nur einen Sprühstoß** pro Inhalationsvorgang in die Kammer! Beachten Sie die Gebrauchsanleitung des Dosieraerosols sowie die Anweisungen des Tierarztes.




Reinigung und Desinfektion RC-Animal Chamber®

<p>1</p>  <p>1. Nehmen Sie den Universaladapter ab, indem Sie den Daumen in die Öffnung stecken und den Adapter mit einer drehenden Bewegung abziehen.</p>	<p>2</p>  <p>2. Ziehen Sie die Maske ab.</p>	<p>3</p>  <p>3. Reinigung: alle Einzelteile in lauwarmes Spülmittelwasser einlegen und anschließend unter fließend warmem Wasser abspülen. Desinfektion: legen Sie alle Einzelteile für ca. 15 Minuten in kochendes Wasser: bitte sauberen Kochtopf und ausreichend frisches Trinkwasser verwenden.</p>	<p>4</p>  <p>4. Schütteln Sie das überschüssige Wasser ab und lassen Sie alle Teile offen an der Luft vollständig trocknen. Nicht trockenreiben!</p>	<p>5</p>  <p>5. Nach dem vollständigen Trocknen fügen Sie alle Teile wieder zusammen.</p>
--	--	--	--	---

<p>Hinweise</p> <ul style="list-style-type: none"> Bei regelmäßiger Anwendung reinigen Sie das Gerät einmal pro Woche, bei Bedarf auch mehrmals. 	<ul style="list-style-type: none"> Kinder und Tiere nicht unbeaufsichtigt mit dem RC-Animal Chamber® spielen lassen. Tauschen Sie bei täglicher Anwendung den RC-Animal Chamber® spätestens nach einem Jahr aus. 	<ul style="list-style-type: none"> Alle Materialien sind latexfrei. Masken sind einzeln erhältlich. Heben Sie die Gebrauchsanweisung auf, vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen. 	<ul style="list-style-type: none"> Alle Teile des RC-Animal Chamber® sind auskochbar, in der Spülmaschine und im Vaporisator zu desinfizieren. 	<ul style="list-style-type: none"> Um Kalkablagerungen zu vermeiden, empfehlen wir das Auskochen in destilliertem Wasser.
--	--	--	--	--

RC-Animal Chamber® – die Inhalierhilfe für Katzen, Hunde und Pferde

<p>RC-Animal Chamber® für Kitten und ausgewachsene Katzen</p>   <p>Artikel-Nr. 2020</p>	<p>RC-Animal Chamber® für kleine, mittelgroße und große Hunde</p>   <p>Artikel-Nr. 2030</p>	<p>RC-Animal Chamber® für Pferde</p>   <p>Artikel-Nr. 2040</p>	<p>RC-Animal Chamber® Maske XS für Kitten und sehr kleine Hunde</p>  <p>Artikel-Nr. 2021</p> <p>RC-Animal Chamber® Maske M für große Hunde</p>  <p>Artikel-Nr. 2031</p>	<p>RC-Animal Chamber® Maske S für ausgewachsene Katzen und mittelgroße Hunde</p>  <p>Artikel-Nr. 2022</p> <p>RC-Animal Chamber® Maske L für Pferde</p>  <p>Artikel-Nr. 2041</p>
---	--	--	---	---



Alleinvertreib Deutschland, Österreich und Schweiz

Hersteller