

RC-Cornet® Druck-Mess-Adapter

ermöglicht den Anschluss eines Manometer und/oder
eine zusätzliche Sauerstoffgabe



Bitte nutzen Sie die Adapterlösung nur, wenn Sie ein ärztliches Rezept für eine Sauerstofftherapie erhalten haben, denn eine Erhöhung des pO₂ könnte zu einer Sauerstoffvergiftung führen. Die maximal zulässige Sauerstoffzufuhr ist 6 Liter/Minute. Bitte beachten Sie genau Ihre Rezeptangaben und die Gebrauchsanweisung der RC-Cornet®/RC-Cornet® PLUS Familien sowie mögliche anzuschließende Manometer oder Medikamentenvernebler.

Gegenindikation: Zusätzliche Sauerstoffzufuhr über die Nase

PZN 03 030 467 | Artikel-Nr. 2350

GEBRAUCHSANWEISUNG



CEGLA
MEDIZINTECHNIK

MENGE: 1

LATEX FREI



PHTHALATFREI

BEI BESCHÄDIGTER
VERPACKUNG NICHT
VERWENDEN

GEBRAUCHS-
ANWEISUNG
BEACHTEN

 Herstellung & Vertrieb:
CEGLA Medizintechnik
GmbH & Co. KG
Horresser Berg 1
56410 Montabaur
Tel +49 2602 92 13-0
www.cegla.de

REF

2350



23511 - 03/2021