

## HYGIENISCHE WIEDERAUFBEREITUNG RC-CORNET® – BASISCORNET

Vor einem Patientenwechsel muss das RC-Cornet® sterilisiert werden.

### 1 REINIGUNG UND DESINFEKTION

---

- 1.1 Ziehen Sie das Mundstück mit dem Ventilschlauch aus dem Krümmer und führen Sie den Trocknungsspatel in den Schlauch ein.
- 1.2 Geben Sie den Krümmer und das Mundstück mit dem Ventilschlauch in die Instrumentenspülmaschine.
- 1.3 Wählen Sie das 93 °C-Programm (Einwirkzeit 5 Minuten). Bei Verwendung von Reinigungsmitteln, beachten Sie bitte die Dosierungsanweisung des Herstellers. Alle Reinigungsmittel aus der VAH-Liste können in Verbindung mit dem RC-Cornet® verwendet werden.
- 1.4 Überschüssiges Wasser ausschütteln und Teile an der Luft trocknen lassen. Wichtig: Während der Trocknung muss der Trocknungsspatel den Ventilschlauch geöffnet halten.

### 2 STERILISATION

---

- 2.1 Verstauen Sie das zerlegte RC-Cornet® in einer dafür vorgesehenen Sterilisationsverpackung.
- 2.2 Das RC-Cornet® kann nach dem folgenden Verfahren sterilisiert werden: 121 °C für mindestens 15 Minuten oder 134 °C für 5 Minuten.
- 2.3 Vor der nächsten Anwendung setzen Sie alle Teile des RC-Cornet® wieder zusammen. Zum Einführen von Mundstück mit Ventilschlauch benutzen Sie bitte die Einführhilfe.