

# RC-SAUERSTOFFNASENBRILLE KRATON – ERWACHSENE



## Aus weichem Kraton

### Im Lieferumfang enthalten:

- weiche Kraton-Nasenspitzen
- Anschlusschlauch 2,1 m




**Gebrauchsanweisung –**  
Bitte sorgfältig lesen!

**VERWENDUNGSZWECK:** Mit der Sauerstoffnasenbrille atmen Sie medizinischen Sauerstoff über die Nase ein. Weiche Kraton-Nasenspitzen verhindern bei Überempfindlichkeit allergische Reaktionen am Naseneingang – die Nase wird geschont. Der mit der Sauerstoffnasenbrille verbundene Schlauch ist durch Innenriefen und Verstärkungen abknicksicher. Die maximale Durchflussrate der Sauerstoffnasenbrille beträgt 6 l/min.

**ANWENDUNG:** Die Sauerstoffnasenbrille wie eine Schlinge über den Kopf ziehen, die Nasenspitzen weisen dabei auf Sie zu. Den oberen Teil wieder nach vorne ziehen, sodass der Schlauch wie eine Brille von den Ohren gehalten wird. Nasenspitzen in jedes Nasenloch einführen. Sitz der Brille durch Hochschieben der Befestigungsschlaufe am unteren Ende der Sauerstoffnasenbrille fixieren. Adapter am Schlauchende mit der Sauerstoffquelle verbinden und den vorgeschriebenen Sauerstofffluss einstellen.

**REINIGUNG UND HYGIENE:** Reinigen Sie die Nasenteile mit einem handelsüblichen Geschirrspülmittel oder in einer Essigwasserlösung (Mischungsverhältnis von 4:1). Spülen Sie dann mit klarem Wasser nach. **Bitte nur für einen Patienten verwenden!** Nehmen Sie regelmäßig (spätestens nach 14 Tagen) eine neue Sauerstoffnasenbrille. Der Schlauch enthält Phthalate. In den Nasenspitzen sind keine Phthalate enthalten.

**WARNHINWEIS:** Verwenden Sie keinesfalls öl- oder fetthaltige Nasensprays, Cremes oder Nasentropfen in Verbindung mit Sauerstoff. Wir empfehlen das Nasen- und Rachenspray RC-Pflege® N (PZN 06 415 162). Rauchen, Streichhölzer und offene Flammen, wie brennende Kerzen oder Feuerstellen, sind in der Nähe von Sauerstoffgeräten/Sauerstoffnasenbrillen strengstens verboten.

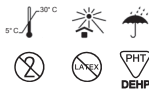

**REF** 710 | PZN 03 367 304



REV.

**LOT**

**CE**  
0120

Erhältlich in Apotheken,  
Sanitätshäusern oder unter  
[www.cegla-shop.de](http://www.cegla-shop.de)

**Hersteller:**  
Respan Products Inc.  
8 Erinville Drive, Erin,  
Ontario, Canada N0B1T0

**EU-Verantwortlicher:**  
mdi EUROPA GmbH  
Langenhagener Str. 71  
D-30855 Hannover-  
Langenhagen

**CEGLA**  
MEDIZINTECHNIK

Alleinvertrieb:  
R. Cegla GmbH & Co. KG  
Horresser Berg 1  
56410 Montabaur  
Germany  
Fon +49 2602 92 13-0  
[info@cegla.de](mailto:info@cegla.de)  
[www.cegla.de](http://www.cegla.de)

05/2017